

RESALIVA odběrová souprava


Návod k použití



Před samotným odběrem **30 min.**
nejezte, nepijte, nekuřte,
nevyplachujte si ústa.




Umyjte nebo dezinfikujte si ruce.

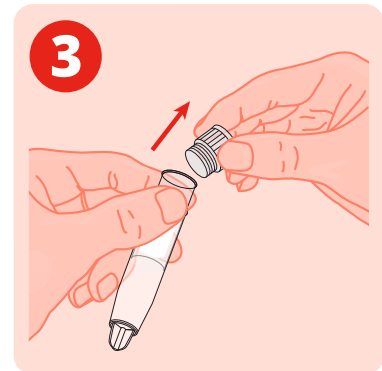

Opatrně otevřete zkumavku
s tyčinkou na sliny.




Tyčinku vložte do úst.

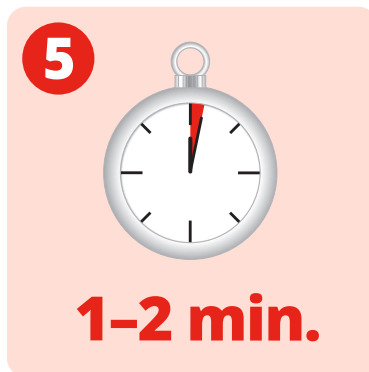

Tyčinku nechte v ústech
1-2 min. bez žvýkání.




Tyčinku ústy vložte do zkumavky.

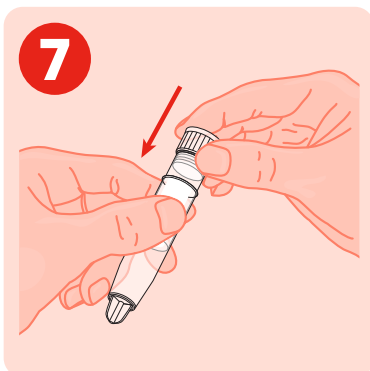

Zkumavku pořádně zavřete.



Na zkumavku nalepte přiložený
čárový kód, tak aby byl pouze na
dolní části odběrové zkumavky.

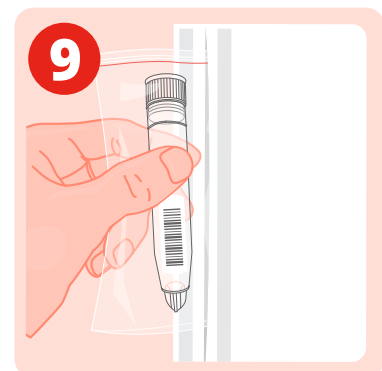

Zkumavku vložte v igelitovém
sáčku do obálky a odešlete
do laboratoře.

Katalogové číslo GS-316 Odběrová zkumavka na sliny | orders@genespector.com